


AeroChamber Plus Flow-Vu*

Anti-Static Valved Holding Chamber

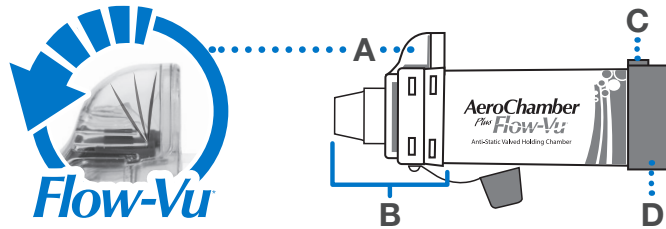

UTILISATION PRÉVUE

Cette chambre est conçue pour être utilisée avec un aérosol-doseur pour vous administrer les traitements par aérosol dans les poumons, comme vous l'a prescrit votre professionnel de la santé.

AVANT CHAQUE UTILISATION

Cette chambre est directement prête à l'emploi. Veillez à ce que ces consignes et les consignes fournies avec l'inhalateur soient lues. Examinez attentivement la chambre puis retirez tout corps étranger. Remplacez immédiatement toute pièce manquante ou endommagée.

Remarques



RALENTISSEZ l'inhalation si le sifflet se fait entendre, car cela signifie que vous inhalez trop rapidement.




Si quelqu'un vous aide, cette personne peut consulter l'indicateur respiratoire **Flow-Vu*** pour vérifier la bonne étanchéité, synchroniser les pressions sur l'inhalateur avec vos inhalations et compter le nombre de respirations effectuées. L'indicateur **Flow-Vu*** se déplace vers vous quand vous inspirez et ne bouge que si l'étanchéité est appropriée.

1x Administrez une (1) bouffée à la fois. Suivez les consignes fournies avec l'inhalateur sur le temps d'attente à respecter avant de répéter l'opération.

COMMENT UTILISER VOTRE CHAMBRE

Pour préparer l'inhalateur, suivez les instructions qui l'accompagnent.

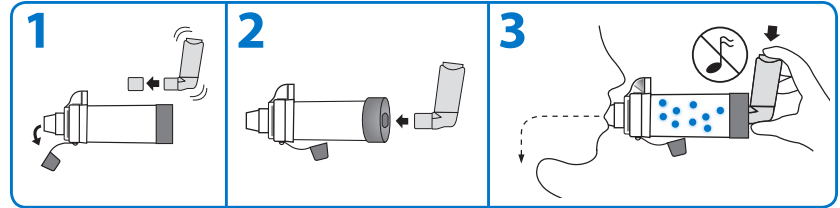

1 Retirez les capuchons de l'inhalateur et de la chambre de l'embout buccal. Secouez bien l'inhalateur immédiatement avant usage, conformément aux consignes qui l'accompagnent.

2 Insérez l'inhalateur dans la pièce arrière de la chambre. Placez l'embout buccal dans votre bouche et refermez vos lèvres autour de lui pour vous assurer que le contact est étanche.

3 Expirez, puis pressez une fois sur l'inhalateur au début d'une inspiration lente. Inspirez doucement et profondément par la bouche jusqu'à effectuer une respiration complète. Retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes avant d'expirer. **OU** Expirez, puis pressez une fois sur l'inhalateur au début d'une inspiration lente. Inspirez et expirez dans la chambre pendant 2-3 respirations en refermant les lèvres autour de l'embout buccal de la chambre.




Vous pouvez regarder des vidéos de patients faciles à utiliser sur [YouTube.com](https://www.youtube.com)



CONSIGNES DE NETTOYAGE

Cette chambre est directement prête à l'emploi et doit être nettoyée chaque semaine.

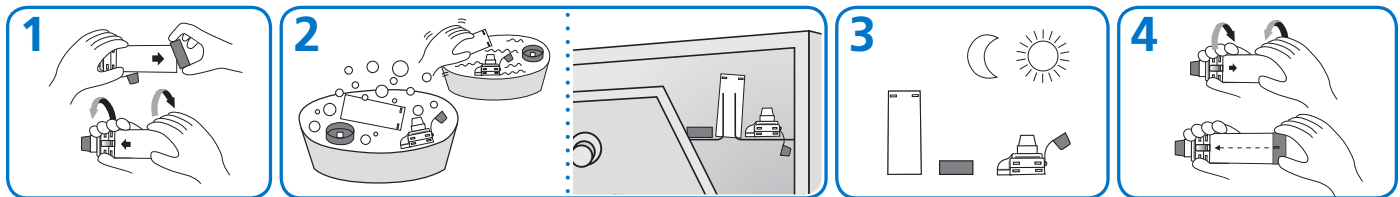

1 Retirez la pièce arrière (D). Pour détacher la pièce avant (B), tournez la chambre comme indiqué.

2 Faites tremper les pièces pendant 15 minutes dans une solution douce de détergent à vaisselle liquide et d'eau propre et tiède. Agitez doucement. Rincez les pièces à l'eau claire. **OU** Placez les pièces dans la partie supérieure du lave-vaisselle. Assurez-vous que le produit est placé correctement, tourné vers le haut. Faites fonctionner le lave-vaisselle au cycle normal ou délicat. Évitez le séchage à chaud.

3 Éliminez le surplus d'eau des pièces en les secouant et laissez-les sécher en position verticale. Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de les réassembler.

4 Pour le remontage, placez la pièce avant (B) sur l'extrémité de la chambre et tournez fermement jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée. Alignez la coche d'alignement (C) sur la pièce arrière avec l'indicateur d'inhalation **Flow-Vu*** (A), comme indiqué. Appuyez fermement pour fixer la pièce arrière (D).

Remarques

- Ne faites pas bouillir ou stériliser.
- Le produit doit être remplacé au bout de 12 mois d'utilisation.
- Ce produit ne contient pas de latex.
- Ne partagez pas l'utilisation de cet appareil médical avec d'autres personnes.
- Si vous constatez un dépôt de médicament dans la chambre, nettoyez soigneusement l'intérieur de la chambre avec un chiffon doux.
- Il est déconseillé de laver l'appareil au lave-vaisselle avec trop de vaisselle sale.
- Si vous le lavez au lave-vaisselle, utilisez un produit de rinçage.

Mises en garde

- Ne laissez pas la chambre à proximité d'enfants sans surveillance. La chambre n'est pas un jouet.
- Le produit peut être endommagé de façon permanente s'il est bouilli, stérilisé ou nettoyé au lave-vaisselle à une température supérieure à 70 °C.